

Листовка вашему покупателю

Как выбрать глюкометр

Прибор, с помощью которого вы можете контролировать уровень сахара в крови, не выходя из дома, должен быть точен, надежен и удобен.

На что стоит обратить внимание при покупке домашнего помощника*?

Точность измерения

Любой глюкометр устроен так, что должен сначала «опознать» свою тест-полоску. Различные приборы делают это по-разному. Воспользуйтесь таблицей, чтобы снизить вероятность ошибок.

МОДЕЛЬ	СПОСОБ КОДИРОВАНИЯ	ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ...
FreeStyle Pappilon Mini и др.	Введение кода вручную с помощью кнопок	... правильно вводите цифры кода, указанные на упаковке ТП ... сверяйте код с указанным на упаковке ТП перед каждым использованием (он может быть сбит) ... введите новый код при использовании новой упаковки ТП
Ascensia Entrust, линия Accu-Check, Optium Xceed, Bionime Rightest GM 300 и др.	Кодирование с помощью чип-ключа	... сверьте код, указанный на чипе и на упаковке ТП ... вставьте чип, сверьте появившийся на экране код с тем, что указан на упаковке ... при смене упаковки ТП не забудьте вставить новый чип ... не используйте ТП из другой упаковки с чипом от предыдущей
One Touch Select Simple	Прибор заранее закодирован на определенную партию ТП, поставляемых только на территорию РФ	... не используйте ТП, приобретенные за пределами РФ, а также переданные вам другими пользователями прибора, они могут иметь другой код
КОНТУР ТС с технологией «Без кодирования»	Прибор кодируется автоматически, код нанесен на каждую ТП	... не требуется никаких дополнительных действий

Наличие фермента нового поколения (GDH-FAD) в составе тест-полосок

Это означает, что влияние повышенного уровня холестерина в крови, приема некоторых лекарств (ацетилсалициловой и аскорбиновой кислоты, парацетамола, интерферона и др.) на точность измерений таким прибором** сведено к минимуму.

Капиллярный забор крови

Наличие данной технологии в приборе позволяет проводить измерения с **ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ КАПЛЕЙ КРОВИ** (0,6 мкл в глюкометре **КОНТУР ТС**). А чем меньше объем крови, тем незначительнее прокол и выше скорость заживления.

*Перед использованием прибора ознакомьтесь с Инструкцией по применению и проконсультируйтесь со специалистом

** Фермент GDH-FAD содержится в ТП КОНТУР ТС